

**Przeznaczenie:**

**HIGIENA POWIEK**

BLEPHACLEAN przeznaczony jest do codziennej higieny powiek, zwłaszcza w przypadku:

- wrażliwej skóry powiek i okolic oczu;
- konieczności usunięcia zanieczyszczeń, pyłków i wydzieliny z powiek. Stosowanie produktu może być częścią pielęgnacji, gdy występuje alergia lub stan zapalny oczu;
- istniejącego podrażnienia, stanu zapalnego lub zakażenia powiek, takich jak zapalenie skóry powiek, zaburzenia czynności gruczołów Meiboma, jęczmień lub gradówka. Stany te mogą powodować objawy suchości oczu, takie jak swędzenie, uczucie piasku w oku, ból i (lub) zaczerwienienie oczu;
- przygotowania się do zabiegów okulistycznych, takich jak iniekcje wewnątrzgałkowe, laserowe korekcje wad wzroku (LASIK lub PRK) i operacje usunięcia zaćmy. Ponieważ produkt ten jest dobrze tolerowany, BLEPHACLEAN można stosować także po operacji, zgodnie z zaleceniami lekarza.

BLEPHACLEAN utrzymuje powieki w czystości, nie naruszając jednocześnie naturalnej bariery ochronnej (mikrobiologicznej) skóry wokół oczu.

Przed zabiegiem lub operacją okulistyczną BLEPHACLEAN należy stosować **dwa razy dziennie** przez 5 dni lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

W pozostałych przypadkach należy stosować **dwa razy dziennie**, rano i wieczorem, przez 3 tygodnie, a następnie raz dziennie przez 3 miesiące lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Niektóre stany zapalne powiek są przewlekłe i wtedy należy stosować higienę powiek i ich brzegów systematycznie i długoterminowo.

Nie wymaga splotkiwania po użyciu.


BLEPHACLEAN może być stosowany u dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy.

Produkt testowany pod kontrolą okulistyczną, pod kątem bezpieczeństwa dla narządu wzroku.


**W przypadku noszenia soczewek kontaktowych** należy je zdjąć przed zastosowaniem produktu BLEPHACLEAN.

**Sposób użycia:**

1. Pielęgnacja powiek i rzęs:  
Otworzyć saszetkę i rozłożyć chusteczkę. Nie otwierając oczu, ostrożnie przyłożyć chusteczkę do powiek i nasady rzęs. Delikatnie masować powieki małymi, kolistymi ruchami, usuwając wszelkie zanieczyszczenia, wydzieliny i kosmetyki.

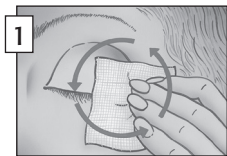

2. Pielęgnacja brzegów powiek:  
Przed lustrem delikatnie rozchylić powieki, lekko przytrzymując je u nasady rzęs. Ostrożnie przetrzeć brzeg powieki za pomocą zwiniętej chusteczki.

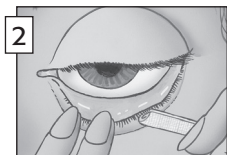

Czynność powtórzyć wokół drugiego oka, używając nowej chusteczki.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:**

Produkt do stosowania wyłącznie na skórę.

Unikać bezpośredniego kontaktu z powierzchnią oka.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.

BLEPHACLEAN jest produktem sterylnym, **wyłącznie do jednorazowego użycia**.

Użytej chusteczki nie należy stosować ponownie, ponieważ może to zwiększać ryzyko zakażenia.

Nie stosować chusteczki, jeśli saszetka jest otwarta lub uszkodzona.

Ze względu na zawartość naturalnych ekstraktów roślinnych kolor chusteczek (roztworu) może się różnić.

Jeśli objawy nasilają się, należy zaprzestać używania produktu Blephaclean i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie stosować po upływie terminu ważności jednoznacznie określonego na opakowaniu zewnętrznym oraz na saszetce. Termin ważności odnosi się do produktu w nienaruszonym opakowaniu, przechowywanego prawidłowo. Każdą chusteczkę należy po zastosowaniu wyrzucić do domowego pojemnika na odpadki.

**Przechowywać w temperaturze od 8 do 25°C.**

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.

**Możliwe działania niepożądane:**

Podczas stosowania Blephaclean zgłaszano następujące zdarzenia: pieczenie lub uczucie swędzenia przez kilka minut po użyciu, zaczerwienienie lub obrzęk powiek, reakcje alergiczne.

**Opis produktu:**

Sterylnie chusteczki nasączone płynem. Płyn zawiera: kapryloil glicyny, hialuronian sodu, PEG 8, Poloxamer 184, polisorbit 20, glikol propylenowy, wyciąg z hydrokotylu (glikol propylenowy, wyciąg z wąkrotki azjatyckiej *Centella asiatica* i woda), kompleks regulujący sebum, niezawierający konserwantów (glikol propylenowy, wyciąg z korzenia kosaćca florenckiego *Iris florentina*, siarczan cynku, PPG-5 Ceteth 20 i palmitynian retinylu (witamina A), alkohol i woda), PEG 6 glicerydy kaprylowe / kaprynowe (tj. makrogol 6 glicerol kaprylo-kaprynowy), fosforan dipotasowy, wodorotlenek sodu, diwodorofosforan potasu, woda oczyszczona.

**Data aktualizacji instrukcji użycia:** Luty 2016

**Dystrybutor w Polsce:**

Thea Polska Sp. z o.o.  
ul. Cicha 7, 00-353 Warszawa

**Wytwórca**  
**Laboratoires THEA**  
12, rue Louis Blériot  
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2  
Francja

Przechowywać w temperaturze od 8 do 25°C

Wyrób jednorazowego użytku

Nie stosować, gdy opakowanie (saszetka) jest uszkodzone

**STERILE** Wyrób jałowy (sterylny); wysterylizowany radiacyjnie

Do wyrobu dołączona jest instrukcja użycia

Uwaga

Termin przydatności do użycia

**LOT** Numer serii

CE 0459