



Przed zastosowaniem należy przeczytać instrukcję

PL

Hyabak® UD

Nawilżające krople do oczu i soczewek kontaktowych

Fiolki jednodawkowe - Produkt nie zawiera środków konserwujących.

SKŁAD:

Hialuronian sodu.....0,6 mg
Chlorek sodu, aktinokinol, trometamol, kwas chlorowodorowy, woda do wstrzykiwań.....do 0,4 ml

NAZWA I ADRES WYTWÓRCY:

Laboratoires THEA
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand - Cedex 2
Francja

KIEDY NALEŻY STOSOWAĆ PREPARAT:

Hyabak® UD jest hipotonicznym roztworem przeznaczonym do stosowania do oczu lub na soczewki kontaktowe. Zawiera kwas hialuronowy (o właściwościach nawilżających i powlekających) oraz aktinokinol (okulistyczny filtr UV).

Preparat Hyabak® UD jest zalecany:

- do nawilżania oczu w przypadku uczucia suchości lub zmęczenia oczu spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, takimi jak: wiatr, dym, zanieczyszczenia, kurz, suche powietrze, klimatyzacja, podróżowanie samolotem, długotrwała praca przed monitorem komputerowym.
- dla osób noszących soczewki kontaktowe - nawilża soczewki w celu ich łatwiejszego zakładania i zdejmowania oraz zapewnia natychmiastowy komfort użytkowania soczewek w ciągu dnia.

Hyabak® UD nie zawiera środków konserwujących, dlatego może być stosowany łącznie ze wszystkimi rodzajami soczewek kontaktowych. Brak środka konserwującego pozwala uniknąć podrażnienia i reakcji alergicznych oraz zapewnia ochronę tkanek oka.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI

OSTROŻNOŚCI:

- Nie stosować preparatu jeśli stwierdzono alergię na którykolwiek ze składników.
- Nie dotykać powierzchni oka końcówką fiołki.
- Nie wstrzykiwać, nie połykać.
- **Zawarty w produkcie filtr UV nie zastępuje noszenia okularów słonecznych.**
- Nie stosować produktu, jeśli fiołki są uszkodzone.

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI.

INTERAKCJE:

Odczekać co najmniej 10 minut pomiędzy zastosowaniem dwóch różnych preparatów do oczu.

JAK STOSOWAĆ PREPARAT HYABAK® UD:

SPOSÓB I DROGA PODANIA:

STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE DO OCZU.

- Przed wkropleniem preparatu należy starannie umyć ręce
- Oderwać jedną fiołkę jednodawkową z taśmy (rysunek 1)
- Obróć do góry nogami i postukać w fiołkę
- Otworzyć fiołkę przez oderwanie końcówki ruchem obrotowym (rysunek 2)
- Zakropić jedną kroplę do worka spojówkowego, odchyłając lekko dolną powiekę i patrząc w górę. (rysunek 3). Podczas zakładania soczewek kontaktowych: nanieść kroplę preparatu na wklęsłą część soczewki.
- Wyrzucić fiołkę natychmiast po zastosowaniu, nawet jeśli zawiera niewykorzystane resztki preparatu.



Nie przechowywać otwartych fiołek.

DAWKOWANIE:

1 kropla do każdego oka w regularnych odstępach czasu w ciągu dnia, według potrzeby.

Osoby noszące soczewki kontaktowe: 1 kropla na każdą soczewkę podczas jej zakładania i zdejmowania, jak również do każdego oka tak często jak to jest konieczne w ciągu dnia.

STERILE | A

NIEPOŻĄDANE I NIEPRZYJEMNE SKUTKI UBOCZNE (DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE):

Rzadko może wystąpić łagodne podrażnienie oczu.

PRZECHOWYWANIE PRODUKTU:

Fiolki jednodawkowe należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

NIE STOSOWAĆ PO UPŁYWIE DATY WAŻNOŚCI JEDNOZNACZNIE OKREŚLONEJ NA OPAKOWANIU.

Termin ważności odnosi się do produktu w nienaruszonym opakowaniu, przechowywanego prawidłowo. Nie stosować produktu, jeśli fiołki są uszkodzone.

Otwarte fiołki należy wyrzucić natychmiast po zastosowaniu produktu.

DATA AKTUALIZACJI ULOTKI: 04/2013.

CE 0459
2013

Théa

N2767U30L02/1113
00000000

00000000