



FAQ- najczęściej zadawane pytania

Co to jest Blephasteam®?

Blephasteam® jest innowacyjnym i opatentowanym wyrobem medycznym przeznaczonym do łagodzenia objawów związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem, znajdujących się w powiekach, gruczołów Meiboma (MGD). Zatkanie gruczołów Meiboma oraz/lub ich nieprawidłowe wydzielanie (zbyt skąpe lub zbyt obfite) jest często przyczyną problemów z oczami np.:

- zespołu suchego oka
- dolegliwości ocznych takich jak pieczenie, szczypanie, swędzenie
- nawracających zapaleń, jęczmieni i gradówek
- i innych.

Blephasteam® innowacyjne urządzenie zapewnia optymalne środowisko (wilgotne i ciepłe), które w naturalny sposób poprawia jakość łez, co przekłada się na poprawę stanu powierzchni oka, zdrowia oczu, widzenia i komfortu. Główny efekt polega na zwiększeniu grubości i jakości warstwy lipidowej filmu łzowego, co poprawia funkcjonowanie łez. Warstwa lipidowa filmu łzowego się pochodzi z gruczołów Meiboma w powiekach. Gruczoły Meiboma często mogą ulegać zablokowaniu, co powoduje dolegliwości m.in. zespół suchego oka.


Blephasteam® zapewnia długotrwałą terapię z zastosowaniem utajonego ciepła w kontrolowanych warunkach, która umożliwi odblokowanie gruczołów Meiboma i uzyskanie poprawy stanu powieki i ich brzegów oraz całego oka (poprawa homeostazy) .

Co to są Gruczoły Meiboma i jaką funkcję spełniają?

Gruczoły Meiboma występują wzdłuż brzegów powiek. Produkują one niewielkie ilości wydzieliny tłuszczowej:

- zapewniają gładką powierzchnię naszych oczu
- zapobiegają zbyt szybkiemu odparowaniu łez
- chronią oczy przed wysychaniem i poważnym uszkodzeniem ich powierzchni
- zabezpieczają przed przelewaniem się łez przez brzegi powiek.

Wszystko to jest niezbędne dla prawidłowego widzenia i funkcjonowania naszych oczu.

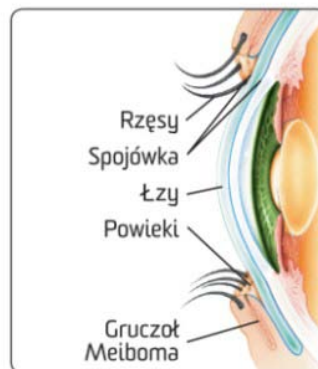

Co to jest dysfunkcja gruczołów Meiboma (MGD)?

Dysfunkcja gruczołów Meiboma (MGD) związana jest z **zatkaniami** gruczołów Meiboma oraz/lub ich **nieprawidłowym wydzielaniem** (zbyt obfitym lub zbyt skąpym). W wyniku tych nieprawidłowości dochodzi do obniżenia jakości i/lub ilości potrzebnej wydzieliny tłuszczowej i wystąpienia problemów z oczami. Początkowo możemy odczuwać jedynie

dyskomfort i pieczenie oczu, światłowstręt. Z czasem może dołączyć się **podrażnienie oczu, zaczerwienienie oczu** lub **obecność zaschniętej wydzieliny** u nasady rzęs, swędzenie, niewyraźne widzenie. Bardzo często rozwijają się nawracające stan zapalny w obrębie powiek i ich brzegów, jęczmienie, gradówki.

Warto pamiętać, że problemy z oczami spowodowane zatkaniem gruczołów Meiboma oraz ich nieprawidłowym wydzielaniem mogą powracać, a ich całkowite wyleczenie może być niemożliwe!

Jak rozpoznać dysfunkcje gruczołów Meiboma (MGD)?

Objawy dysfunkcji gruczołów Meiboma (MGD) są niespecyficzne i na ogół myli się je z objawami zespołu suchego oka oraz innych chorób oka.

Początkowo możemy odczuwać jedynie dyskomfort i pieczenie oczu, światłowstręt. Z czasem może dołączyć się **podrażnienie oczu, zaczerwienienie oczu i/lub brzegów powiek** lub **obecność zaschniętej wydzieliny** u nasady rzęs, swędzenie, niewyraźne widzenie, objawy zespołu suchego oka. Występują częste i nawracające stany zapalne w obrębie powiek i ich brzegów, jęczmienie, gradówki.

W takiej sytuacji konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem okulistą, który po zbadaniu i potwierdzeniu diagnozy zaleci odpowiednią terapię.

Jak leczyć dysfunkcje gruczołów Meiboma (MDG)?

W przypadku zdiagnozowania dysfunkcji gruczołów Meiboma (MGD) jako źródła problemu okulista wdraża zazwyczaj tradycyjną metodę ogrzewania i higieny powiek i ich brzegów. **Należy pamiętać, że dysfunkcja Gruczołów Meiboma (MGD) wymaga systematycznego leczenia.**

Jednym z elementów leczenia dysfunkcji gruczołów Meiboma (MGD) jest codzienna higiena powiek i ich brzegów. Podobnie jak w przypadku wszystkich schorzeń, konieczna jest wizyta u lekarza, który przepisze antybiotyki o działaniu ogólnoustrojowym oraz antybiotyki lub leki steroidowe o działaniu miejscowym. Lekarz wyjaśni również, jak je stosować.

Bardzo ważna jest terapia termiczna powiek i ich brzegów. Polega ona na stosowaniu gorących okładów, które bywają niepraktyczne, czasochłonne i nie zapewniają przedłużonej i kontrolowanej terapii ciepłem wilgotnym.

Blephasteam® jest odpowiedzią na potrzeby pacjentów i lekarzy w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i wygody stosowania.

Blephasteam® to opatentowany wyrób medyczny, opracowany na podstawie oryginalnych badań naukowych prowadzonych przez dr. J R Fullera, brytyjskiego konsultanta ds. okulistyki. **Blephasteam® umożliwia prowadzenie terapii termicznej w kontrolowanych warunkach. Taka terapia odblokowuje gruczoły Meiboma oraz poprawia stan powiek i oczu.**

Urządzenie jest bezpieczne i wygodne w użyciu oraz umożliwia ostre widzenie i mruganie podczas stosowania. **Blephasteam®** spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa.

Jak stosować Blephasteam®?

Blephasteam® to wyrób medyczny zalecany przez lekarzy okulistów.

Blephasteam® należy stosować dwa razy dziennie chyba, że lekarz zaleci inaczej. Pomiędzy kolejnymi sesjami muszą upłynąć przynajmniej 4 godziny.

Bardzo ważne jest przestrzeganie instrukcji obsługi i zaleceń lekarza okulisty.

Urządzenia należy używać ze zwilżonymi pierścieniami **Blephasteam**®. Pierścienie te są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku i należy je wymieniać po użyciu.

Urządzenia **Blephasteam**® powinna używać tylko jedna osoba. Po każdym użyciu należy je dokładnie oczyścić za pomocą dołączonej do opakowania suchej, niebieskiej ściereczki lub nasączonej alkoholem szmatki.

Czy mogę używać **Blephasteam**®, jeśli noszę soczewki kontaktowe?

Podobnie jak w przypadku każdego leku okulistycznego przed użyciem **Blephasteam**® należy zdjąć soczewki kontaktowe.

Czy mogę stosować **Blephasteam**® z innymi produktami?

Przed użyciem **Blephasteam**® należy zdjąć soczewki kontaktowe.

Pomiędzy użyciem **Blephasteam**® i kropli do oczu należy zachować odstęp minimum 15 minut.

Czy można stosować **Blephasteam**® u dzieci?

Urządzenie **Blephasteam**® może być stosowane u dzieci pod nadzorem i po konsultacji z lekarzem okulistą. Brak danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności u dzieci.

Jak długo **Blephasteam**® utrzymuje swą temperaturę?

Przed użyciem należy podłączyć **Blephasteam**® do prądu na 15 minut w celu wstępnego podgrzania urządzenia. Po tym czasie jest ono gotowe do użycia. Przed użyciem należy zwilżyć dwa pierścienie **Blephasteam**® i umieścić je w okularach, a następnie umieścić je na oczach.

Sesja z użyciem okularów **Blephasteam**® trwa 10 minut. W tym czasie można czytać, oglądać telewizję lub po prostu odpoczywać.

Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką informacyjną.

Jaką temperaturę osiągają okulary **Blephasteam**®?

Bezpieczeństwo i skuteczność okularów **Blephasteam**® oceniono w wielu badaniach klinicznych. Wykazano, że poziom temperatury i wilgoci połączony z długością leczenia jest bezpieczny i wygodny dla pacjenta. Okulary **Blephasteam**® ogrzewają powieki do temperatury 40°C, co wystarcza do rozpuszczenia nagromadzonego sebum bez szkody dla oczu i powiek.

Jak czyścić okulary **Blephasteam**®?

Okularów **Blephasteam**® powinna używać tylko jedna osoba. Po każdym użyciu należy je dokładnie oczyścić za pomocą dołączonej do opakowania suchej, niebieskiej ściereczki lub nasączonej alkoholem szmatki.

Nie należy zanurzać okularów w wodzie ani myć ich pod bieżącą wodą.

Kiedy nie należy używać okularów **Blephasteam**®?

Okularów **Blephasteam**® nie należy używać w następujących przypadkach, chyba że lekarz zaleci inaczej:

- ostre choroby oczu i/lub powiek,
- niedawny uraz i uszkodzenia rogówki oka,

Blephasteam® - Najczęściej zadawane pytania - FAQ

- o łojotok gruczołów Meiboma (nadmierne wydzielanie wydzieliny przez gruczoły powiek),
- o zabieg chirurgiczny oka lub powierzchni wokół oka.

Przed użyciem **Blephasteam®** należy zdjąć soczewki kontaktowe.

Pomiędzy użyciem **Blephasteam®** i kropli do oczu należy zachować odstęp minimum 15 minut.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z okulistą.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące produktu lub zasięgnąć porady lekarskiej, należy skontaktować się z lekarzem okulistą lub firmą THEA POLSKA Sp. z o.o. (www.thea.pl lub www.oftadirect.pl- oficjalny sklep internetowy Thea Polska)

Gdzie mogę kupić okulary i pierścienie Blephasteam®?

Okulary i pierścienie **Blephasteam®** na terenie Polski można zamawiać na stronie internetowej www.oftadirect.pl sklepu internetowego Thea Polska sp. z o.o..

Jaki jest okres gwarancyjny okularów Blephasteam®?

Gwarancja na okulary **Blephasteam®** obowiązuje przez 2 lata od daty zakupu w normalnych warunkach użytkowania i obejmuje wszystkie wady (wadliwy materiał lub wykonanie), o ile produkt był użytkowany zgodnie z zaleceniami.

W razie innych problemów lub wątpliwości dotyczących funkcjonowania urządzenia należy skontaktować się z firmą Thea Polska Sp. z o.o..

Jak zwrócić wadliwy produkt?

W przypadku wady lub z nieprawidłowego działania produktu należy go zwrócić do firmy Thea Polska Sp. z o.o. w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu, opisem wady i danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, adres, mail lub telefon kontaktowy).

W razie innych problemów lub wątpliwości dotyczących funkcjonowania urządzenia należy skontaktować się z Thea Polska Sp. z o.o..



Thea Polska Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 38
00-789 Warszawa

mail : sklep@thea.com.pl lub info@thea.com.pl
zamówienia : www.oftadirect.pl